

Wheel chair

MIWA
Happy to be
health life enjoy

身体にやさしい乗り心地
機能性に優れ、暮らしに夢を



Happy to be車いすシリーズ

HTB-22MS

HTB-20D

HTB-12

MW-22A

MW-22S

Aluminum

跳ね上げ式アームサポート、開閉着脱式フット・レッグサポート



手押しハンドル
介助者用速度調整用ブレーキです。



バックサポート(背もたれ)シート(座面)
背部、座面の張り強弱が容易にできます。

安 全設計でラクラク移動
アルミニウムだから軽くて丈夫

HTB-22MS

アルミクロス折りたたみ機構付きフレーム。

標準価格
¥110,000
(非課税)

本体重量 16.0kg

使用者最大体重
100kg



認定商品




後部ポケット
工具、小物入れとして使用
できる便利な大型ポケットです。

オプション シートセット ¥22,000



バックサポート(背もたれ)

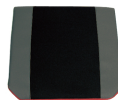

シート(座面)



後部ポケット

カラーバリエーションにより、楽しく家外で
季節を1人じめ。楽しい一日をまさに
Enjoy health enjoy life!




レッド



ココア



ブルー

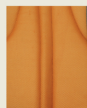

オレンジ

折りたたみができ
ラクに持ち運びが
できます。



HTB-22MS仕様

①座幅	450mm
②前座高	460mm
③後座高	450mm
④フット・レッグサポート長さ	400~460mm
⑤座奥行	430mm
⑥バックサポート高さ	410mm
⑦アームサポート高さ	200mm
⑧全幅	690(300)mm
⑨全長	1060*770mm
⑩全高	880mm
⑪キャスト(前輪)	6インチ
⑫タイヤ径	22インチ

()は折りたたみの時
*はフット・レッグサポートを外した時

▼**レッグサポート(足ベルト)**

足の固定用としてベルトの強弱の調整ができます。



フットサポート(足乗せ)

スイングアウトで一人で乗り降りが楽にできます。



フット・レッグサポート

開閉着脱式(アウト&イン)になっています。



アームサポート(肘当て)

跳ね上げ式で、乗り降りが楽になります。


▼**制動用バンドブレーキ**

安心・安定のバンドブレーキ。



ディッピングレバー

介助者が段差で前輪を上げる時に踏むためのレバー。

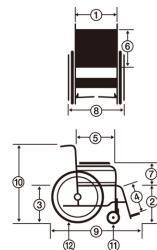

SGマーク制度とは ●SGマーク付き製品の欠陥により発生した人身事故に対する補償制度です。

- 安全性が確保されます。
- 誤使用を防ぐために取扱説明書が同梱されています。
- 製品の欠陥により人身事故が起きた場合、賠償制度が実施されます。

Aluminum

軽量コンパクト、スイング式フットサポート

軽量コンパクト HTB-20D

20インチ自走・介助兼用の軽量コンパクトタイプ。
介助者が速度調整できる制動用ブレーキ、駐車
用ブレーキが付いているので安心です。

本体重量 12.8kg

使用者最大体重
75kg



標準価格
¥75,000
(非課税)



手押しハンドル
介助者用速度調整用ブレーキです。



バックサポート(背もたれ)
ワンタッチで背折れができ、持ち運び、収納が
容易です。



駐車用タイヤブレーキ
停車時、駐車時に使用します。



フットサポート
スイング式のフットサポートです。



背面ポケット
工具や小物入れとして使用します。




制動用バンドブレーキ
安心・安定の制動用ブレーキです。

折りたたみの場合



持ち運び用持ち手つき

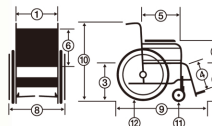

HTB-20D仕様

①座幅	400mm
②前座高	430mm
③後座高	410mm
④フロントレグサポート長さ	400mm
⑤座奥行	400mm
⑥バックサポート高さ	390mm
⑦アームサポート高さ	200mm
⑧全幅	600(280)mm
⑨全長	960(710)mm
⑩全高	850(660)mm
⑪キャスタ(前輪)	6インチ
⑫タイヤ径	20インチ

()は折りたたみの時

軽量コンパクト HTB-12

12インチ介助式の軽量コンパクトタイプ。
移動、収納性に優れ、持ち運びが便利です。
折りたたむため軽自動車にラクラク積めます。

本体重量 9.5kg

使用者最大体重
75kg



標準価格
¥68,000
(非課税)



手押しハンドル
介助者用タイヤブレーキです。



バックサポート
ワンタッチで背折れができ、持ち運び、収納が
容易です。



駐車用タイヤブレーキ
停車、駐車時に使用します。



フットサポート
スイング式のフットサポートです。



背面ポケット
工具、小物入れとして使用します。




持ち手
シート(座面)両側に持ち手で移動。便利
性を発揮します。車体重量も9.5kgと軽いです。

折りたたみの場合



折りたたむため軽自動車にラクラク入ります。
全幅250mm、全長650mm、全高660mmと
コンパクト。

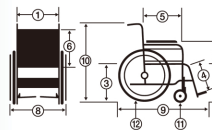

シート3カラー
お好きなカラーをお選びいただけます。



チェックブルー

チェックグリーン

無地ブルー

HTB-12仕様

①座幅	400mm
②前座高	440mm
③後座高	410mm
④フロントレグサポート長さ	400mm
⑤座奥行	400mm
⑥バックサポート高さ	380mm
⑦アームサポート高さ	240mm
⑧全幅	580(250)mm
⑨全長	980(650)mm
⑩全高	840(660)mm
⑪キャスタ(前輪)	6インチ
⑫タイヤ径	12インチ

()は折りたたみの時

シンプルで使いやすい！ 標準形車いす

自走・介助兼用

MW-22A

シンプルで使いやすい
折りたたみ式フレーム
。3段階調節フットサ
ポート、安心、安定の
制動用ブレーキ付きで

本体重量 13.5kg

使用者最大体重
100kg


標準価格
¥58,000

(非課税)



アルミ製フレーム

クロスフレームで折りたたみができま

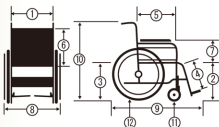

MW-22A仕様

①座幅	400mm
②前座高	420mm
③後座高	410mm
④フット・レッグサポート長さ300~340mm	
⑤座奥行	400mm
⑥バックサポート高さ	420mm
⑦アームサポート高さ	220mm
⑧全幅	660 (280) mm
⑨全長	950mm
⑩全高	860 (650) mm
⑪キャスト (前輪)	6インチ
⑫タイヤ径	22インチ

() は折りたたみの時



フットサポート

3段階調節ができるフットサポートで



駐車用タイヤブレーキ
停止、駐車時に使用します。



背折れ金具

ワンタッチ背折れタイプです。



背面ポケット

工具、小物入れとして使用します。

耐久性抜群！ 標準形車いす

自走式

MW-22S

スチール製で耐久性抜
群。お手入れ簡単レザー
素材。3段階調節フットサ

本体重量 14.8kg


使用者最大体重
100kg

オープンブライス



スチール製フレーム

クロスフレームで折りたたみができ耐
久性が抜群です。

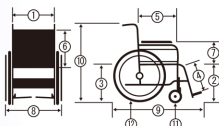

MW-22S仕様

①座幅	400mm
②前座高	430mm
③後座高	410mm
④フット・レッグサポート長さ 330~370mm	
⑤座奥行	400mm
⑥バックサポート高さ	430mm
⑦アームサポート高さ	220mm
⑧全幅	640 (310) mm
⑨全長	1000mm
⑩全高	860 (670) mm
⑪キャスト (前輪)	6インチ
⑫タイヤ径	22インチ

() は折りたたみの時



フットサポート

3段階調節ができるフットサポートで



駐車用タイヤブレーキ

ロングバー (200mm) で操作が簡単



背折れ金具

ワンタッチ背折れタイプです。



背面ポケット

工具、小物入れとして使用します。

●乗り方・降り方●

●車いすに乗り降りする時やベッドへの移乗時には、必ずブレーキをロックしてください。（車いすが動き、転倒事故の原因になります）

●車いすの乗り降りの際は、路面の平坦な場所で行ってください。（車いすが動き、バランスを崩し、転倒・転落事故の原因となります）

乗る時

1. ブレーキを左右共ロックする。
2. フットサポートを左右共上げる。
3. 両手でアームサポートを持ちゆっくり座る。
4. フットサポートを下げて足を乗せる。

降りる時

1. ブレーキを左右共ロックする。
2. フットサポートから足を降ろす。
3. 両手でアームサポートを持ち、ゆっくり立ち上がる。

自分で動かす場合

●走行する時

ハンドリムのこぎ始め位置は、ひじを軽く曲げ円を描くようにこぎます。


●傾いた道の時

傾いた側に力を入れ、車いすが道の低いほうへ曲がらないようにこぎます。普通のこぎ方は低いほうに曲がってし




●段差がある時

段差の直前で停車し、段差に対して直角にキャスタをあてます。体を前傾させ、おしりの位置を深くし、ハンドリムを強くこいで前進してください。
※勢いよく段差に当てても越え

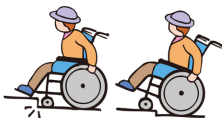


●坂道の時

坂道で上がる時は、前傾の姿勢で前向きに上り、下る時は前傾の姿勢でハンドリムでの回転で調整し、ブレーキをかけながら後ろ向きに下るのが

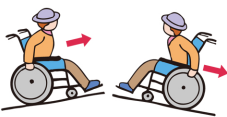

●溝や踏切の時

キャスタや駆動輪の幅、直径よりも広い溝や踏切等を通過する時は、溝に対して直角に進入してください。直角でない場合、キャスタや駆動輪が溝にはまって抜けなくなる恐れがあります。溝の手前でキャスタを持ち上げ、通過する

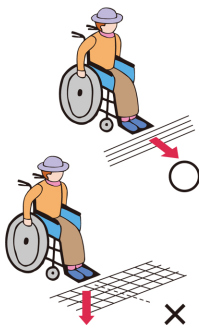

●グレーチングの時

グレーチング（側溝を埋める金網など）を通過する場合は、グレーチングに対し斜め

介助者が動かす場合

●走行する時

介助者が車いすの手押しハンドルを握り、進行方向へ押します。急発進や急停止は非常に危険です。出発の合図や声をかけるなどの配慮をお願いします。




●傾いた道の時

傾いている側の手に力を入れ、車いすが低いほうに曲がらないようにして押します。普通の押し方では低いほうへ



●坂道の時

坂道では、前傾の姿勢で前向きで上り、後ろ向きで下るのが基本です。

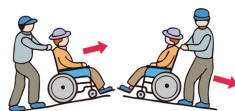

●溝や踏切の時

キャスタや駆動輪の幅・直径よりも広い溝や、踏切等を通過する場合は、直角に進入してください。直角でない場合、キャスタや駆動輪が溝にはまり、抜けなくなる恐れがあります。溝の手前でキャス



●グレーチングの時

グレーチング（側溝を埋める金網など）を通過する場合は、グレーチングに対し斜め

村+家具

〒604-0966 京都市中京区夷川通富小路西入
TEL 075-231-0638 Fax 075-255-6001

E-mail: info@muratakagu.co.jp
http://www.muratakagu.co.jp



株式会社美和商事

〒541-0053 大阪府中央区本町4-5-6 永光ビル403-2号

TEL (06) 6271-6020 FAX (06) 6271-6088

介護事業部/TEL (06) 6271-6055

0120-955-780 (10:00~17:30/土日祝祭日は除く)